



PL 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 187/189
tel. +48 42 640 48 70, fax +48 42 688 33 84

Instrukcja używania wosku dentystycznego



Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej www.wiedent.com.pl w zakładce oferta/woski dentystyczne/wosk modelowy miękki/wosk modelowy twardy.

Przeznaczenie

Wosk dentystyczny to wyrób medyczny klasy I przeznaczony do wykonywania woskowego prototypu protezy weryfikowanej u pacjenta.

Opis

Wosk dentystyczny cechuje się bardzo dobrą plastycznością uzyskaną dzięki zastosowaniu do produkcji wosku pszczelego i żywic naturalnych. Jest oferowany w wersjach miękki i twardy.

Surowce użyte do produkcji

W skład wyrobu wchodzi woski naturalne, parafiny syntetyczne i barwnik do parafin.

Sposób postępowania

Płytki wosku uplastycznij przed użyciem wkładając do ciepłej wody lub trzymając nad płomieniem palnika. Przygotowany w ten sposób wosk używać do wykonywania prac protetycznych.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

Okres użytkowania wyrobu zależy od sposobu jego przechowywania. Wosk nieprawidłowo przechowywany może z upływem czasu tracić plastyczność, kolor i formę.

Opakowania

Wosk dentystyczny oferowany jest w opakowaniach ok. 500 g (24 płytki).

Warunki przechowywania i transportu

W opakowaniach, w suchym, nie nasłonecznionym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Wosk modelowy trzeba zużyć w czasie nie dłuższym niż 3 lata od wyprodukowania.

Podstawa prawna

Wosk modelowy spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.

Stosowane symbole



Wytwórca



Przestrzegać instrukcji używania



Znak zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745



Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania



Chronić przed światłem słonecznym



Produkt jest wyrobem medycznym



Nr serii



Termin ważności



Data wydania: 17.08.2022

D 3322-8