



PL 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 187/189

tel. +48 42 640 48 70, fax +48 42 688 33 84

Instrukcja używania

zębów akrylowych Classic



Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej www.wiedent.com.pl w zakładce oferta/zęby akrylowe/Zęby akrylowe Classic.

Przeznaczenie

Zęby akrylowe CLASSIC to wyrób medyczny klasy I przeznaczony do ruchomych protez zębowych.

Opis

Zęby akrylowe CLASSIC oferowane są w 30 fasonach w dziewięciu kolorach uniwersalnej gamy kolorystycznej V. Zbudowane są z dwóch warstw (dentyny i szkliwa). Podobnie jak zęby naturalne mają efekt fluorescencyjny. Twardość szkliwa porównywalna jest z twardością zębów naturalnych. Warstwa dentyny jest bardziej miękka w celu zapewnienia elastyczności i dobrego łączenia się zębą z masą na płyty protez. W celu zapewnienia dobrego łączenia zębą z masą na płyty protez, zęby boczne posiadają wgłębienie. Zęby CLASSIC spełniają wymagania norm międzynarodowych PN EN ISO 22112 i PN EN ISO 7491.

Surowce użyte do produkcji

Zęby akrylowe CLASSIC są produkowane z proszków - polimerów na bazie metakrylanu metylu i metakrylanu allilu zawierających nadtlenek benzoilu (PMMA typu IPN) oraz pigmentów, a także z płynów - monomeru metakrylanu metylu (MMA) i dimetakrylanu 1,4 butandiolu (1,4 BDDMA).

Sposób postępowania

Przed osadzeniem zębów w masie na płyty protez należy usunąć wosk wrzątkiem oraz odtłuścić zęby monomerem akrylowym w celu uniknięcia ich wypadania z płyty protezy po przeprowadzonej polimeryzacji. Zęby wytrzymują temperaturę do 100°C i po procesie polimeryzacji na gorąco przy łączeniu z masą na płyty protez zachowują powierzchnię błyszczącą dającą się łatwo polerować.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

- zagrożeniem dla protetyka może być wdychanie pyłu podczas szlifowania zębów,
 - przy tych pracach zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.
- Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjenta następujących wskazówek:
- protezy zębowe wykonane z zębów akrylowych należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji protez,
 - protez zębowych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
 - protezy zębowe, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
 - należy okresowo sprawdzać dopasowanie protez zębowych.
 - protezy zębowe nie nadające się do dalszego użytku nie wymagają specyficznego traktowania, nadają się do recyklingu i mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi.

Warunki przechowywania i transportu

Zęby akrylowe CLASSIC należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Podczas przechowywania i transportu należy zachować temperaturę od 3 do 30°C oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Zęby akrylowe CLASSIC trzeba zużyć w czasie nie dłuższym niż 10 lat od wyprodukowania szczególnie ze względu na możliwe obniżenie jakości opakowania.

Zgłaszanie poważnego incydentu

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Podstawa prawna

Zęby akrylowe CLASSIC spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.

Stosowane symbole



Wytwórca



Przestrzegać instrukcji używania



Znak zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745



Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania



Chronić przed światłem słonecznym



Produkt jest wyrobem medycznym



Nr serii



Termin ważności

Data wydania: 29.09.2025

D 4025-3